


Uso de tabla de Transferencia

1 Descripción

Este dispositivo está diseñado para transferir un paciente de una cama o camilla a otra. Permite desplazar al paciente con el mínimo esfuerzo, aún cuando existan diferencias de altura entre cama y camilla. Puede ser usado en personas con alteración de conciencia y/o limitación parcial o total de la movilidad.

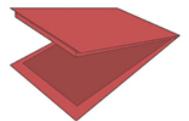

2 Cómo se usa



- Los asistentes se deben ubicar a ambos lados de la cama o camilla.
 - Inclinar al paciente utilizando una posición segura hacia un lado de la cama o camilla.



- Mientras un asistente sostiene el cuerpo del usuario, inclinado hacia un costado de la cama o camilla, el segundo asistente guía el RollerSlide bajo el cuerpo del usuario. Al menos un tercio del cuerpo del usuario debe quedar sobre el dispositivo de transferencia.



- Acomodar al usuario en posición dorsal, acostándolo sobre la tabla de transferencia.



- Para retirar el dispositivo, incline al paciente o usuario hacia un lado y tire del RollerSlide.

2.1 Uso de Roller Slide



- Los asistentes deben trabajar, cada uno a un lado de la cama o camilla, empujando y/o tirando del RollerSlide según corresponda.
- Realizar estos movimientos de tirar o empujar, ejecutando movimiento como si fuera a caminar.



- La distancia entre las superficies adyacentes no debe superar los 20 centímetros. El dispositivo, también, puede ser utilizado cuando existe una pequeña diferencia en la altura de las superficies adyacentes.



- En caso de tomar radiografías al usuario, retirar el dispositivo.