

Ficha de Apoyo Preventivo
 Campaña Manejo Manual de Pacientes

Uso de transportador

1 Descripción

El transportador permite mover pacientes, girarlos y asistirlos en su incorporación. Favorece la reducción de los esfuerzos y seguridad de los asistentes que realizan la movilización, desplazamiento y/o transferencia de pacientes desde una superficie a otra. Puede ser utilizado en forma individual o en conjunto con otras ayudas técnicas.



2 Cómo se usa



- Los asistentes se ubican a cada lado de la cama, mientras el paciente se encuentra en posición dorsal.
 - Colocar un primer transportador bajo las pantorrillas del paciente y un segundo dispositivo bajo los hombros.



- Amos asistentes se trasladan, colocándose en el mismo costado de la cama. Mientras uno de ellos se ubica a la cabeza del usuario, tomando las manillas del FlexiMove que se encuentra bajo los hombros del paciente, el segundo asistente se sitúa a sus pies y sostiene las manillas ubicada bajo las piernas del usuario.



- Amos asistentes tiran el dispositivo hacia sí, girando y acomodando al paciente en posición segura, hasta sentarlo al borde de la cama.



- Para transferir a silla de ruedas, valorar la condición del paciente.
 - Si el paciente conserva movilidad en extremidades inferiores, colocar un transportador bajo las caderas y ayudar a transferir hasta la silla.
 - Si el paciente tiene movilidad limitada en extremidades inferiores, se sugiere el uso del cinturón de transferencia.
 En ambos casos, se puede utilizar el disco de transferencia para apoyar y facilitar la transferencia del paciente a silla.



- Una vez instalado el dispositivo, el(los) asistente(s) se ubica(n) de pie, en frente del paciente. Tomar las manillas del FlexiMove o del cinturón de transferencia y ayudar a levantar al paciente, mientras éste se pone en pie.



- Tanto si utiliza el transportador como si ocupa el cinturón de transferencia, el asistente girará pivoteando con el pie, mientras sostiene fuertemente las manillas del dispositivo. De este modo, ambos -usuario y asistente- giran hasta sentar al paciente en la silla de ruedas.

2.1 Colocación de FlexiMove para movilizar al paciente en cama:



- Los asistentes se ubican uno a cada lado de la cama del usuario.
 - Colocar un transportador bajo las caderas del paciente y el segundo dispositivo bajo los hombros del paciente.



- Deslizar los dos dispositivos hacia arriba de la cama, tirando de las manillas de ambos, situados a los costados del paciente.